



EQUIPOD.®

GERÄTEHANDBUCH

## Inhalt des Benutzerhandbuchs:

3. Produktbeschreibung
4. Anwenderhinweise: Mobile App und manueller Modus
5. Inbetriebnahme des Geräts
8. Empfohlene Behandlungsprogramme
9. Positionierung des Zubehörs
12. Platzierung der Elektrodenpads
14. Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen
15. Garantie

## Lieferumfang

- 1 x EquiPod-Gerät
- 1 x Pad-Leitungsdraht
- 2 x Klebe-Elektroden-Pads
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Aufbewahrungstasche für das Gerät

## Zusätzliches Systemzubehör

- EquiPod Leitfähiges Gel
- EquiPod KorWrap
- EquiPod KorBand



EquiPod ist ein komplettes Therapiesystem für Ihr Pferd, das entwickelt wurde, um den Heilungsprozess bei einer Vielzahl von Verletzungen und schmerzhaften Zuständen durch eine fortschrittliche Form des transkutanen Mikrostroms zu unterstützen und zu verbessern.

Der Mikrostrom arbeitet unterhalb der sensorischen Schwelle, ist absolut schmerzfrei, nicht-invasiv und wird von Pferden gut vertragen.

## EquiPod-Behandlungsprogramme:



### Therapie & Regeneration

Unterstützt die Regeneration und fördert somit die Heilung unzähliger Wunden und Verletzungen.



### Schmerztherapie

Nicht-pharmakologische Behandlung von chronischen und akuten Schmerzen.



### Pflege & Wohlbefinden

Ziel ist die Förderung der körperlichen Gesundheit und das funktionelle Wohlbefinden der Gelenke und Weichteile.

# GERÄTE-EINSTELLUNG: MOBILER APP-MODUS & MANUELLER MODUS



## Mobiler App-Modus

Ermöglicht dem Benutzer die volle Nutzung aller EquiPod-Funktionen.

### Schritt 1:

Melden Sie sich auf Ihrem Gerät bei der EquiPod App an.

### Schritt 2:

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Onboarding abzuschließen, Geräte zu koppeln und Behandlungsprogramme zu aktivieren.

Die EquiPod-App ist für iOS und Android Mobiltelefone verfügbar. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie die App direkt aus dem Google Play Store oder Apple App Store herunter.

**Hinweis:** Die EquiPod-App erfordert ein Smartphone mit Bluetooth 4.0, Android 4.3 (oder höher) oder iOS 8.0 oder höher.




Scannen,  
um die App  
herunterzu-  
laden.



**Manueller Modus:** Ermöglicht die manuelle Aktivierung des Geräts und die volle Nutzung der EquiPod-Programme, wenn kein mobiles Gerät verfügbar ist.

## GERÄTEFUNKTIONEN

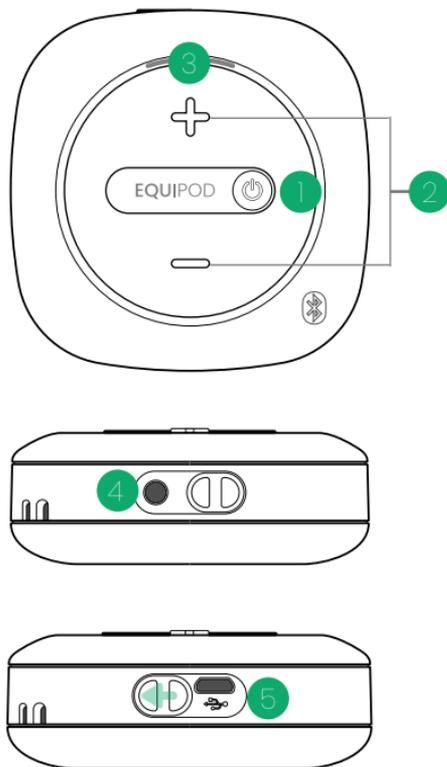

1 **ON/OFF-Taste**

2 **Behandlungsprogramm ändern**

3 **LED-Kontrollleuchte**

Zeigt das gewählte Behandlungsprogramm an:

- Therapie und Regeneration
- Schmerztherapie
- Pflege & Wohlbefinden

4 **Anschluss**

Behandlungskabel anschließen

5 **Micro-USB**

Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Kabel an eine USB-Stromquelle an.

Schalten Sie das Gerät zum Laden ein.

- Aufladen
- Vollständig geladen

## GERÄTEBEDIENUNG: MANUELLER MODUS



### 1 Gerät einschalten

Halten Sie die  Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Einschalten. Die LED-Anzeige blinkt kurz und zeigt den Ladezustand der Batterie an:



### 2 Behandlungsprogramm wählen



Die LED-Anzeige zeigt die aktuelle Behandlung in einer Farbe an:

-  Therapie & Regeneration
-  Schmerztherapie
-  Pflege & Wohlbefinden

Drücken Sie die Taste **+** oder **-** für 2 Sekunden, um die Behandlungsoptionen zu durchlaufen.

### 3 Behandlung starten

Halten Sie die Taste  1 Sekunde lang gedrückt. Die Behandlungsdauer ist auf 60 Minuten voreingestellt. Die LED-Anzeige blinkt, wenn die Pad-Verbindung hergestellt ist und zeigt an, dass die Behandlung läuft.

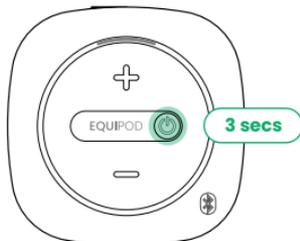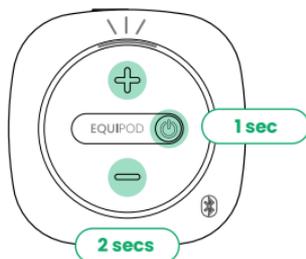

4

#### Behandlung unterbrechen

To pause treatment hold button  Zum Unterbrechen der Behandlung die Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten.

Die LED-Anzeige wechseln zwischen blau, rot und grün. Um die Behandlung fortzusetzen, halten Sie die Taste für 1 Sekunde.

Das Gerät setzt sich automatisch auf den Programmstart zurück, wenn die Behandlung nicht innerhalb von 3 Minuten fortgesetzt wird.

5

#### Behandlung beenden

Die Behandlung endet automatisch nach 60 Minuten und die LED-Anzeige leuchtet abwechselnd blau, rot und grün.

Um das gleiche Behandlungsprogramm erneut zu starten, drücken Sie die Taste  für 1 Sekunde. Um ein anderes Behandlungsprogramm zu wählen. Drücken Sie die Taste **+** oder **-** für 2 Sekunden.

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Behandlung gewählt wird.

6

#### Ausschalten

Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt.

## BEHANDLUNGSPROGRAMME & PROTOKOLLE

EquiPod-Programme können kombiniert werden, um individuelle Anwendungen für jedes Pferd zu erstellen.



### THERAPIE & REGENERATION

Unterstützt und fördert den Heilungsprozess und unterstützt die Regeneration.

- **Akute Phase der Verletzung:**  
1 Stunde täglich vom Beginn der Verletzung bis zur Genesung.
  - **Erholung nach einem Wettkampf oder Training:**  
1 Stunde am selben Tag und an den folgenden 2 Tagen.
- 

### SCHMERZTHERAPIE

Wird während der Genesung oder als Reaktion auf andere Ursachen von Schmerzen oder Unbehagen eingesetzt.

- Die Häufigkeit und Dauer der Behandlung hängt von den Schmerzsymptomen und den Bedürfnissen des jeweiligen Pferdes ab.
  - **Akute Verletzungen:**  
Kann über einen Zeitraum von einigen Wochen täglich 30 bis 60 Minuten angewendet werden.
  - **Chronische Verletzungen im Zusammenhang mit Schmerzen**  
Möglicherweise sind weniger häufige Behandlungen über einen längeren Zeitraum erforderlich.
- 



### PFLEGE & WOHLBEFINDEN

Anwendung nach Bedarf. Ältere Pferde, Turnierpferde oder solche, die regelmäßig arbeiten, profitieren am meisten von regelmäßigen Behandlungen.

Das EquiPod-Zubehör verfügt über integrierte Silikonelektrodenpads und wird zur gezielten Behandlung des behandelten Bereichs und des umliegenden Gewebes verwendet.



EquiPod-Leitgel ist für jede Behandlung erforderlich und dient als Verbindung zwischen den Elektrodenpads und der Haut. Die erforderliche Gelmenge hängt von der Länge und Dicke des Fells ab.


### Anwendung des EquiPod-Geräts mit dem Bauchgurt oder dem Beingurt:

- 1) Vergewissern Sie sich, dass das Kabel des Zubehörs mit den 2 Druckknöpfen verbunden ist.
- 2) Tragen Sie eine dünne Schicht des EquiPod-Leitgels auf die integrierten Silikonpads auf
- 3) Tragen Sie eine kleine Menge Gel auf das Fell in dem für die Pads vorgesehenen Bereich auf.
- 4) Bringen Sie das Zubehör am Pferd an und achten Sie darauf, dass die Klettbander nicht zu fest angezogen sind.
- 5) Schließen Sie das Kabel des Zubehörs an den Anschluss des EquiPod-Geräts an.
- 6) Schalten Sie das Gerät ein. Wählen und starten Sie die Behandlung über die Mobile-App oder den manuellen Modus.
- 7) Legen Sie das Gerät in die Haltetasche des Zubehörs.
- 8) Prüfen Sie über die Mobile App oder durch Blinken der LED-Anzeige am Gerät, ob die Verbindung hergestellt ist und die Behandlung läuft.



### Unterbrechung der Verbindung während der Behandlung

Wenn die Verbindung unterbrochen wird, wird die Behandlung angehalten und die LED hört auf zu blinken. Stellen Sie das Zubehör neu ein, um einen guten Kontakt mit dem Pad sicherzustellen. Die Behandlung wird automatisch wieder aufgenommen und die LED blinkt erneut. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Verbindung für mehr als 10 Minuten unterbrochen wird.

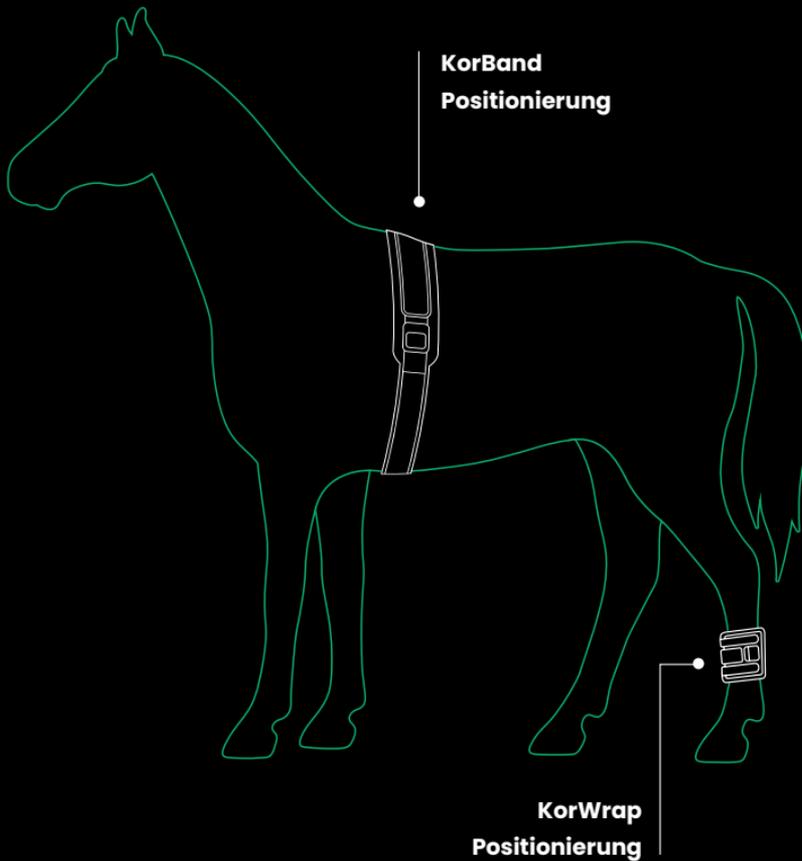

Suchen Sie nach weiteren Beispielen für die Platzierung von EquiPod-Zubehör.

## ELEKTRODEN-PADS

**Klebeelektroden-Pads werden zur gezielten Behandlung von Wunden, Muskeln oder Gelenken verwendet. Die Pads sollten auf beiden Seiten des betroffenen Bereichs angebracht werden. Verwenden Sie das Zubehör KorBand oder KorWrap, um das EquiPod-Gerät zu befestigen.**

**Um eine gute Verbindung zu gewährleisten, kann es erforderlich sein, die Bereiche, in denen die Elektroden angebracht werden, das Fell zu kürzen oder zu scheren:**


- 1) Befestigen Sie den Gurt am Pferd und achten Sie darauf, dass die Gurte nicht zu fest angezogen sind.
- 2) Tragen Sie eine kleine Menge EquiPod-Leitgel auf das Fell in dem für die Pads vorgesehenen Bereich auf. Arbeiten Sie in kreisenden Bewegungen das Gel mit dem Finger in das Fell ein, bis es die Haut erreicht hat.
- 3) Tragen Sie nur eine kleine Menge Gel auf die Mitte jedes Klebepads auf, um sicherzustellen, dass die Ränder der Pads klebrig bleiben.
- 4) Befestigen Sie die Klebepads so, dass das leitende Gel auf dem Pad das leitende Gel auf dem Fell bedeckt.
- 5) Verbinden Sie die magnetischen Anschlüsse des Pad Lead Wire mit den Klebeelektrodenpads (x2).
- 6) Schließen Sie das Behandlungskabel an den Anschluss des EquiPod-Geräts an.
- 7) Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie das Behandlungsprogramm.
- 8) Legen Sie das Gerät in die Halterung am Bein- oder Bauchgurt.




### Unterbrechung der Verbindung während der Behandlung

Wenn die Verbindung unterbrochen wird, wird die Behandlung angehalten und die LED hört auf zu blinken. Stellen Sie das Zubehör neu ein, um einen guten Kontakt zum Pad zu gewährleisten. Die Behandlung wird automatisch wieder aufgenommen und die LED blinkt erneut. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Verbindung für mehr als 10 Minuten unterbrochen wird.

### Vorderseite des Pads mit Anschluss

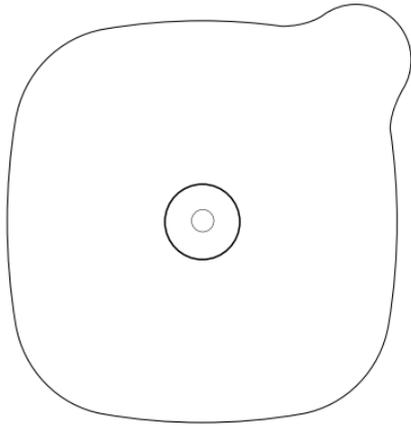

### Rückseite des Pads

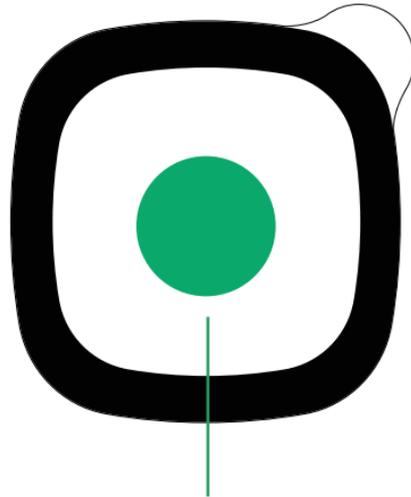

### Auftragen von leitfähigem Gel

Verwenden Sie eine erbsengroße Menge auf der Rückseite des Pads in dem oben gezeigten grünen, kreisförmigen Bereich

## SICHERHEIT UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bringen Sie die Elektrodenpads oder Zubehörpads NICHT auf verletzten Hautstellen an.
- Verwenden Sie es NICHT als Ersatz für eine tierärztliche Behandlung.
- Verwenden Sie es NICHT länger als 3 Stunden in einer ununterbrochenen Behandlungssitzung und entfernen Sie es sofort nach dem Gebrauch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kontaktflächen der Elektroden, das Fell und die Haut vor der Anwendung sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sind.
- Waschen und trocknen Sie nach jeder Behandlung den Bereich, auf den das leitfähige Gel aufgetragen wurde, vorsichtig ab.
- Verwenden Sie EquiPod leitfähiges Gel nur in Verbindung mit dem EquiPod-System.
- Es wird empfohlen, Pferde während der Anwendung des Geräts zu überwachen.
- Nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt.

## WARTUNG UND LAGERUNG

- Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit.
- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör in einer sauberen und trockenen Umgebung auf.
- Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.

## GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt eine eingeschränkte Garantie von einem Jahr ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nur für das Gerät. Zubehör und Verbrauchsmaterialien fallen nicht unter diese Garantie.
  - Während der Garantiezeit werden defekte Teile kostenlos repariert oder ersetzt.
  - Jegliche Anzeichen von unsachgemäßem Gebrauch, Missbrauch, Änderungen oder äußerlich verursachten Schäden können zum Erlöschen der Garantie führen.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an NuroKor Equine oder den Händler Ihres

## KONTAKT-INFORMATIONEN

**[www.equipod.co.uk](http://www.equipod.co.uk) - [info@equipod.com](mailto:info@equipod.com)**

Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX, Vereinigtes Königreich.

Oder Händler in Ihrem Kaufland.

TM und © 2022 NuroKor Animal Healthtech. Alle Rechte vorbehalten. Equipod® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von NuroKor Ltd. Eingetragen im Vereinigten Königreich und anderen Ländern.

Entworfen von NuroKor im Vereinigten Königreich.



# EQUIPOD.®



Werden Sie Mitglied der EquiPod-Gemeinschaft

[EQUIPOD.CO.UK](https://www.equipod.co.uk)

**AH**  
Animal HealthTech  
Innovator